

perio icare

Manuel d'utilisation



Le pansement parodontal

PerioCare est facile à préparer et pratique à utiliser.



1. Extraire des quantités égales de pâte (tube 1) et de gel (tube 2) sur le bloc de mélange.
2. Mélanger la pâte et gel ensemble, en utilisant une spatule, jusqu'à ce que la couleur devienne uniforme.
Un mélange complet prend environ 20 secondes.
3. Former un mélange homogène de PerioCare en forme de tube, sur le bloc de mélange, en utilisant une spatule.
4. Tester l'effet collant avec une spatule ou un doigt humidifié à l'eau. PerioCare est prêt à l'emploi et à être manipulé avec des doigts humidifiés pendant environ 45-60 secondes. (vous pouvez remarquer que PerioCare est exothermique au cours de cette période.)
5. Mouler PerioCare dans la forme souhaitée à l'aide des doigts. PerioCare restera malléable pendant environ 4-5 minutes. Si un temps de travail supplémentaire est nécessaire, placer PerioCare dans de l'eau chaude pour le ramollir.
6. Nettoyer la spatule et les instruments immédiatement, en essuyant proprement. Les instruments peuvent également être nettoyés avec un solvant tel que Wonder Orange ou de l'alcool.

PULPDENT®
INNOVATION DENTAIRE DEPUIS 1947

Les produits de la marque Pulpdent sont des dispositifs médicaux de classe I et IIa, selon la réglementation EC - Directive MDD 93/42/EEC. Ces produits sont réservés à l'usage exclusif des dentistes. Lire attentivement les informations figurant sur la notice.

OPSYSE
3187, Route d'apt - 84800 L'Isle sur la sorgue Tel : 04 42 04 33 68 Fax : 04 85 25 26 61

www.pulpdent.fr

-

contact@pulpdent.fr